



## INTRAUTERIN (MÉHEN BELÜLI) FOGAMZÁSGÁTLÓ ESZKÖZÖK

A méhen belüli fogamzásgátló eszközöket az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kiváló KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGI-BIZTONSÁGOSSÁGI arányuk miatt a születésszabályozás legjobb lehetőségének minősítette.

Fogamzásgátlásban megmutatkozó előnyei sokkal jelentősebbek, mint a mellékhatásai vagy előnytelen tulajdonságai, amelyeket tovább lehet csökkenteni,

ha a modellt az orvos a megfelelőségi kritériumok alapján választja ki. Az Eurogine méhen belüli fogamzásgátló eszközeinek választéka mind nemzeti, mind nemzetközi tekintetben a legnagyobb, számtalan modell, és méretvariációval, beleértve ebbe a réz, valamint arany és ezüstmaggal rendelkező spirálokat, illetve felhelyező rendszereket is.



## GOLD T IUD

Az EUROGINE a katalóniai Politechnikai Egyetemmel (Politechnique University of Catalonia [UPC]), valamint a Technológiai és Ipari Fejlesztési Centrummal (Center for Technological and Industrial Development [CDTI]) együtt vizsgálatot végzett, melynek során bebizonyították, hogy az ezüst – annak ellenére, hogy nemesfémként megfelelő magot biztosít a rézbevonatú spirálhoz – esetenként korrodálhat, ha a korrózió eléri a spirál belsejét, továbbá a méhfolyadékkal létrejövő reakció következményeként a réz spirál töredezté válhat (fragmentálódhat), ami csökkenti a fogamzásgátlás hatékonyságát.

A vizsgálat eredményei alapján az EUROGINE egy olyan, 99,9%-os tisztaságú rézzel bevont arany-

■ 99,9% tisztaságú réz spirál, 0,1 mm es arany maggal, amely csökkenti annak kockázatát, hogy a spirál eltörjön a méhfolyadék által okozott korrózió következtében, és ezzel javítja a fogamzásgátlás hatékonyságát.

■ 375 mm<sup>2</sup> aktív részfelület.

■ 3 elérhető méret (Maxi, Normál, és Mini), amelyek minden uterus méretnek megfelelnek, és ezzel még kényelmesebbek a beteg számára.

■ A méhen belüli fogamzásgátló eszköz (IUD) könnyű és egyedi felhelyezhetőségét biztosító rendszer, amely nagyfokú pontosságot tesz lehetővé.


■ A felhelyezési utasításokat pontosan követve a méhfal punkciójának kockázata teljesen kizárt.

gú spirált fejlesztett ki, amely ellenáll a méhfolyadék korrózív hatásainak és teljesen biokompatibilis az emberi testtel. Ez a spirál javítja a fogamzásgátlás hatékonyságát és kiküszöböli az ezüsttel szembeni esetleges allergiás reakciókat.

A Gold T IUD olyan felhelyezést biztosító rendszerrel rendelkezik, amely garantálja, hogy a méhen belüli fogamzásgátló eszköz (IUD) az uterus fundusában helyezkedjen el. Ez kiemelten fontos a lehető leghatékonyabb fogamzásgátlás biztosítása érdekében. Néhány egyszerű utasítás betartása mellett a GOLD T IUD felhelyezési rendszer gyakorlatilag kizárja a méhfal véletlenszerű punctiójának (kilyukadásának) lehetőségét.


■ Javasolt in situ idő (ameddig az eszköz a helyén maradhat): 5 év.

Az arany-maggal ellátott rézspirál keresztmetszete:

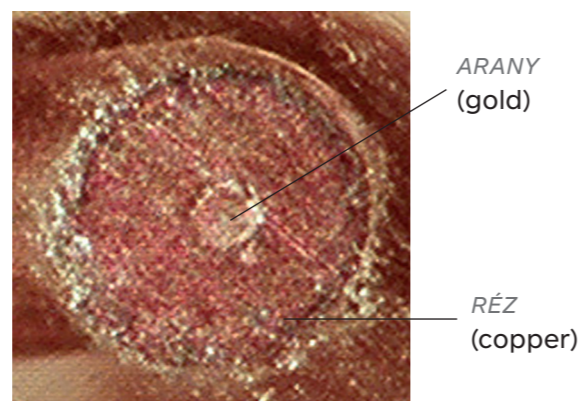


REF.	MEGNEVEZÉS	MÉRET	SZÉLESSÉG	HOSSZÚSÁG
01040000	Gold T	Maxi	36,5 mm	38 mm
01040100	Gold T	Normál	31 mm	33 mm
01040200	Gold T	Mini	24 mm	30,5 mm

## AZ INTRAUTERIN FOGAMZÁSGÁTLÓ ESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA A MÉH MÉRETÉTŐL ÉS ÁLLAPOTÁTÓL FÜGGŐEN

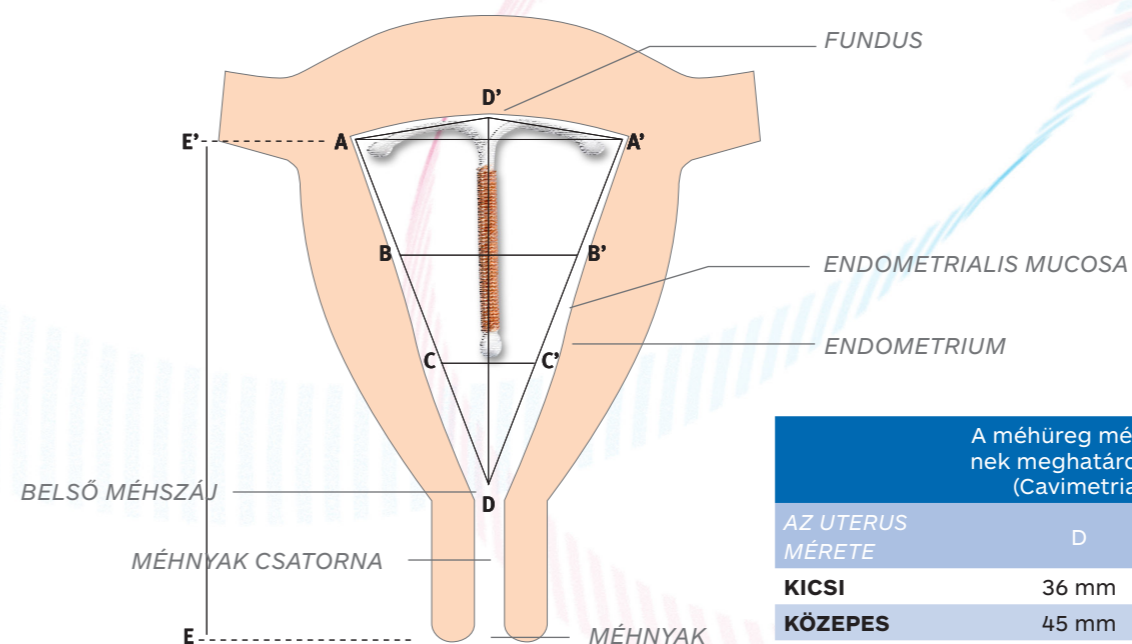

	A méhüreg méretének meghatározása (Cavimetria)	A méh hosszának meghatározása (Hiszterometria)
AZ UTERUS MÉRETE	D	E
KICSI	36 mm	6-7,5 mm
KÖZEPES	45 mm	7-8,5 mm
NAGY	53 mm	8-9 mm

## A MÉH KONTRAKCIÓS ÁLLAPOTA

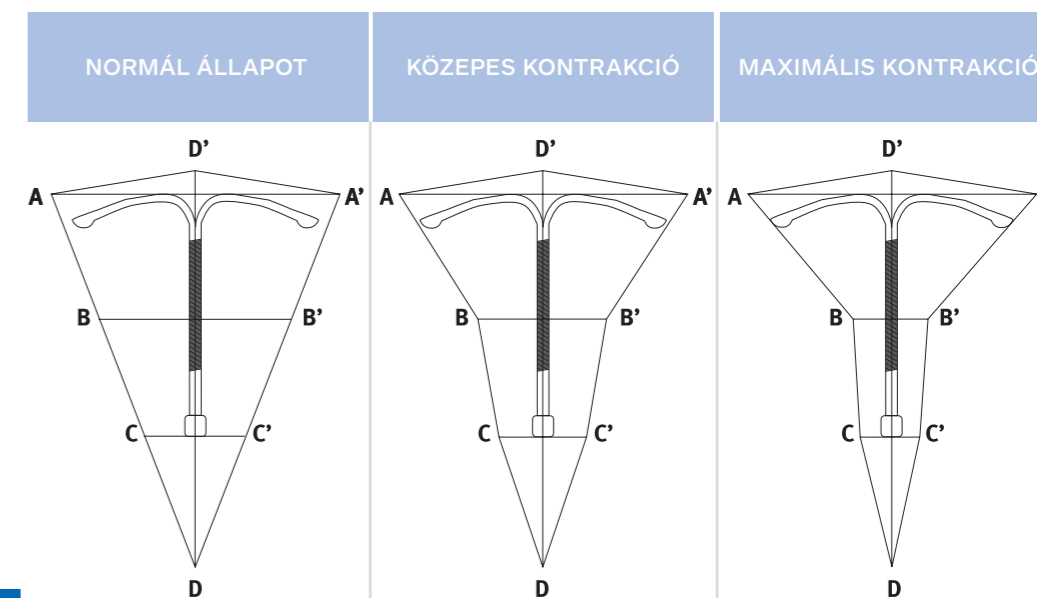

IUD méret	NORMÁL ÁLLAPOT	KÖZEPES KONTRAKCIÓ	MAXIMÁLIS KONTRAKCIÓ
<b>NORMÁL</b>	A 33 mm B 22 mm C 11 mm	A 33 mm B 14 mm C 9 mm	A 33 mm B 9 mm C 7 mm
<b>MINI</b>	A 27 mm B 18 mm C 9 mm	A 27 mm B 12 mm C 7 mm	A 27 mm B 7 mm C 5 mm
<b>MAXI</b>	A 39 mm B 26 mm C 13 mm	A 39 mm B 17 mm C 10 mm	A 39 mm B 10 mm C 8 mm



## „Y” ALAKÚ IUD-K (NOVAPLUS)



- 99,9% tisztaságú réz spirál, 0,1 mm es ezüst maggal, a modelltől függően.
- 380 mm<sup>2</sup> aktív rézfelület.
- „Y” alakú polietilén test, amely elősegíti a trauma-mentes felhelyezést.
- 2 (Normál, és Mini), vagy 3 elérhető méret (Maxi, Normál, és Mini), a modelltől függően
- „Pull and Push” (húzd és told) felhelyező rendszer; az intrauterin fogamzásgátló eszközt be kell tölteni a felhelyező csőbe, majd fel kell helyezni a méhbe.
- Javasolt in situ idő (ameddig az eszköz a helyén maradhat): 5 év.

### MÉHEN BELÜLI FOGAMZÁSTLÁTLÓ ESZKÖZ (IUD) RÖVIDÍTETT HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az „Y” formájú méhen belüli fogamzásgátló eszköz polietilénből készült, amelyre, a függőleges tengelye mentén vörösréz huzalú spirált tekertek fel. A polietilén jelzőszál a spirál alsó végéhez csatlakozik. Ez a szett egy felhelyező csőben helyezkedik el, melyen egy mozgatható csúszka van, a méh méretének megállapítására. Sterilizálás: etilén-oxiddal.

**Indikáció:** méhen belüli fogamzásgátlás, intrauterin összetapadások (synecciák)

**Összetétel:** Réz; Réz + ezüst; Réz + arany

**Használati/kezelési utasítás:** Az IUD-t egyszerhasználatos egységcsomagban forgalmazzuk. Az IUD-t nem szabad újraszterilizálni. Ha a tasak kinyílt vagy megsérült, akkor az IUD-t nem szabad beültetni. Az asepsis szabályait mindig be kell tartani. Az eszköz kivétele után az IUD-t a potenciálisan fertőző biológiai hulladékokra vonatkozó helyi irányelveknek megfelelően kell elhelyezni.

**Ellenjavallatok:** terhesség, kismencedeai gyulladás, acut cervitis, post partum vagy septicus abortus utáni endometritis, kóros genitális eredetű vérzés, rosszindulatú nőgyógyászati megbetegedés, a méh veleszületett rendellenességei, leiomyomatosis uteri, rézallergia, Wilson-kór.

**Hasznos élettartam:** 5 év

contracepció-ginecologia

euro  gine

C. Antoni Gaudí, 91  
08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona) Spain  
Tel. +34 93 630 43 45 - Fax +34 93 630 39 71  
eurogine@eurogine.com / international@eurogine.com  
[www.eurogine.com](http://www.eurogine.com)

  
**Actavis**

Actavis Hungary Kft. 1097 Budapest t (+36 1) 501 7000 @ info@actavis.hu  
Könyves K. krt. 11/C f (+36 1) 501 7002 W www.actavis.hu  
Hungary